



CHAPITRE : LPM- METHODE

REFERENCE :WLPM ENR 14

ENREGISTREMENT

VERSION-7

TITRE : FICHE DE RENSEIGNEMENT : RECHERCHE DE PLASMODIUM

Indexation : LPM–JJMMAA–FRRP- N°

Renseignements du Patient :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :



Renseignements du Prescripteur :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Pays de résidence (12 derniers mois) :

Voyage :

- Pays :
- Départ :
- Retour :
- Autre pays visités et date :

Symptômes motivant la demande :

Fièvre : **Oui** **Non**

Chimiprophylaxie : **Oui** **Non**

- Médicament :
- Suivi après retour : **Oui** **Non**

Heure de prélèvement:h.....min

Commentaire :

.....
.....
.....

NB : Cas de PHL

- La goutte épaisse est confectionnée par l'infirmier ayant réalisé le prélèvement en suivant les étapes suivantes :
- Demander au sujet de se laver soigneusement les mains au savon doux ANIOS, pendant au moins une minute, puis les rincer à l'eau courante avant de les sécher avec du papier essuie-tout,
- Décontaminer ensuite, grâce au TAP le 4^{ème} doigt de la main gauche (le gros orteil peut être utilisé chez le nourrisson) et laisser sécher,

PRELEVEMENT

- Appliquer l'autopiqueur approprié sur le côté et non directement dans la pulpe
- Presser le doigt en amont de la piqûre pour exprimer 1 ou 2 gouttes de sang qui sera (ont) déposée(s) au milieu de la lame porte objet préalablement identifiée par une EtiqS-CB,
- Effectuer, avec l'angle d'une 2^{ème} lame (ou la pointe d'un vaccinstyle), un mouvement circulaire dans la goutte de sang en raclant la surface de la lame, étendre légèrement la surface de la goutte par un mouvement en spirale, et cesser cette défibrination mécanique après 1 à 2 minutes (avant que le sang ne commence à sécher, afin d'obtenir un disque homogène) (Photo1). Le diamètre de l'étalement est d'environ 1-1.5cm(Selon la grosseur de la goutte de sang initiale)

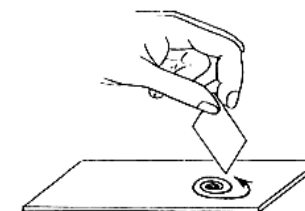


Photo 1

Visa infirmier :

Auteur : DAHAK Hicham	Vérificateur : BELAKHDAR Farah 2017-04-05	Validation : BENTALEB Lamiae 2017-04-05	Approbation : EL KABBAJ Saâd 2017-04-05	Application : 2017-04-05	Page 1 / 1 Edité le : 4 mai 2018
---------------------------------	--	--	--	------------------------------------	---